



GARMIN®

BLAZE™

Equine Wellness System

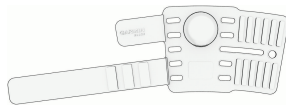

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Εγχειρίδιο
κατόχου



Πίνακας περιεχομένων

Παρουσίαση..... 1

Έναρξη χρήσης του Blaze™ Equine Wellness System.....	1
Παρουσίαση συσκευής.....	1
Λυχνία LED αισθητήρα.....	2
Φόρτιση της συσκευής.....	3
Εγκατάσταση του αισθητήρα στο προστατευτικό ουράς.....	3
Τοποθέτηση του προστατευτικού ουράς στο άλογό σας.....	4
Θέματα σχετικά με την τοποθέτηση του προστατευτικού ουράς.....	6

Οδηγίες για το Blaze™ Equine Wellness System..... 6

Ο αισθητήρας Blaze™ και η εφαρμογή Blaze.....	6
Αντιστοίχιση του αισθητήρα Blaze™ με το τηλέφωνό σας.....	7
Δημιουργία προφίλ για το άλογό σας.....	7
Έναρξη δραστηριότητας στην εφαρμογή Blaze™.....	8
Παρατήρηση δραστηριότητας στην εφαρμογή Blaze™.....	8
Ονομασία αισθητήρα.....	8

Ο αισθητήρας Blaze™ και το ρολόι Garmin®.....	9
Λήψη λειτουργιών του Connect IQ™.....	9
Αντιστοίχιση του αισθητήρα Blaze™ με το ρολόι σας.....	9
Έναρξη δραστηριότητας στο ρολόι σας.....	10

Στοιχεία συσκευής..... 11

Προδιαγραφές.....	11
Informações de Radiocomunicação.....	0
Φροντίδα της συσκευής σας.....	11
Συμβουλές για τον καθαρισμό και τη φύλαξη.....	12
Ενημερώσεις προϊόντος.....	13
Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής με την εφαρμογή Blaze™.....	13
Λήψη περισσότερων πληροφοριών.....	13

Αντιμετώπιση προβλημάτων..... 13

Συμβουλές για ακανόνιστα δεδομένα καρδιακών παλμών.....	13
Είναι το ρολόι μου Garmin® συμβατό με τον αισθητήρα Blaze™;.....	14

Το τηλέφωνό μου δεν συνδέεται στη συσκευή.....	14
Ο αισθητήρας Blaze™ δεν ανταποκρίνεται.....	14
Δεν μπορώ να επιλέξω τον αισθητήρα μου για μια δραστηριότητα.....	15
Επανεκκίνηση του αισθητήρα.....	15
Επαναφορά του αισθητήρα.....	15
Πώς μπορώ να ελέγξω τη στάθμη της μπαταρίας;.....	15
Κατάργηση αισθητήρα.....	16

Παρουσίαση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Πάντα να συμβουλευέστε τον κτηνίατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε ένα αισθητήριο καρδιακών παλμών ή προτού ξεκινήσετε ή τροποποιήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Έναρξη χρήσης του Blaze™ Equine Wellness System

- 1 Φορτίστε τη συσκευή (σελίδα 3).
- 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή (σελίδα 1).
- 3 Αντιστοιχίστε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Blaze στο τηλέφωνό σας (σελίδα 7).


Η εφαρμογή σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα άλογα και τους αισθητήρες σας, να ξεκινάτε μια δραστηριότητα και να παρατηρείτε ζωντανές δραστηριότητες.

- 4 Ελέγξτε για ενημερώσεις (σελίδα 13).

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, θα πρέπει να διατηρείτε το λογισμικό της συσκευής σας ενημερωμένο. Οι ενημερώσεις λογισμικού παρέχουν αλλαγές και βελτιώσεις στο απόρρητο, στην ασφάλεια και στις λειτουργίες.

- 5 Εγκαταστήστε τον αισθητήρα στο προστατευτικό ουράς (σελίδα 3).
- 6 Τοποθετήστε το προστατευτικό ουράς στο άλογο (σελίδα 4).
- 7 Ξεκινήστε μια δραστηριότητα (σελίδα 8).

Παρουσίαση συσκευής

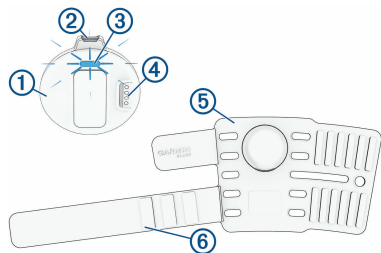

① Αισθητήρας	Τοποθετήστε τον αισθητήρα στο προστατευτικό ουράς (σελίδα 3).
② Κουμπί συσκευής	Για να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα, πατήστε και αφήστε γρήγορα. Για να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα, πατήστε παρατεταμένα. Για να γίνει επαναφορά του αισθητήρα, πατήστε τρεις φορές και μετά παρατεταμένα (σελίδα 15).
③ Λυχνία LED κατάστασης	Δείχνει την κατάσταση του αισθητήρα (σελίδα 2).
④ Θύρα φόρτισης	Συνδέστε το καλώδιο USB για να φορτίσετε τον αισθητήρα (σελίδα 3).
⑤ Προστατευτικό ουράς	Τοποθετήστε το προστατευτικό ουράς στο άλογο (σελίδα 4).
⑥ Ιμάντας προέκτασης	Τυλίξτε τον ιμάντα προέκτασης γύρω από το προστατευτικό ουράς (σελίδα 4).

Λυχνία LED αισθητήρα

Δραστηριότητα λυχνίας LED	Κατάσταση
Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα	Ο αισθητήρας είναι ενεργοποιημένος.
Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα	Ο αισθητήρας βρίσκεται σε λειτουργία αντιστοίχισης.
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Ο αισθητήρας επικοινωνεί με ένα τηλέφωνο ή ρολόι.
Σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα	Ο αισθητήρας είναι στον φορτιστή και πλήρως φορτισμένος.
Αναβοσβήνει αργά με κίτρινο χρώμα	Ο αισθητήρας φορτίζει.
Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα	Παρουσιάστηκε σφάλμα ή η μπαταρία ενδέχεται να είναι εξαιρετικά χαμηλή. Φορτίστε τον αισθητήρα και επαναφέρετε τον αισθητήρα, εάν το πρόβλημα παραμένει (σελίδα 15).

Δραστηριότητα λυχνίας LED	Κατάσταση
Σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα	Ο αισθητήρας βρίσκεται σε λειτουργία επαναφοράς (σελίδα 15).
Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	Ο αισθητήρας ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ή εκτελεί ενημέρωση λογισμικού.

Φόρτιση της συσκευής


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά και στεγνώστε τις επαφές και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή. Ανατρέξτε στις οδηγίες καθαρισμού (σελίδα 11).

Η συσκευή τροφοδοτείται από μια ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου που μπορείτε να φορτίσετε σε μια τυπική πρίζα ή μέσω μιας θύρας USB στον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν φορτίζεται εάν βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου εύρους τιμών θερμοκρασίας (σελίδα 11).

1 Πιέστε το κλιπ φόρτισης ①.

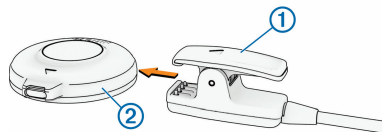


- 2 Ευθυγραμμίστε το κλικ με τις επαφές στο πίσω μέρος της συσκευής ②.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο USB σε ένα τροφοδοτικό AC ή σε μια θύρα USB υπολογιστή.
- 4 Συνδέστε τον προσαρμογέα AC σε μια τυπική πρίζα.
- 5 Φορτίστε πλήρως τη συσκευή.

Η λυχνία LED κατάστασης αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα κατά τη φόρτιση. Η λυχνία LED κατάστασης ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Εγκατάσταση του αισθητήρα στο προστατευτικό ουράς

- 1 Τοποθετήστε τον αισθητήρα στο προστατευτικό ουράς με το βέλος στον αισθητήρα ευθυγραμμισμένο με το βέλος στο προστατευτικό ουράς.

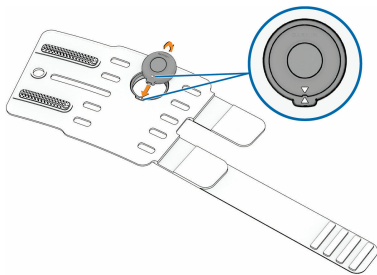

- 2 Πιέστε τον αισθητήρα στο προστατευτικό ουράς.

Τοποθέτηση του προστατευτικού ουράς στο άλογό σας

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Σε ορισμένα άτομα μπορεί να παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος μετά από παρατεταμένη χρήση του προστατευτικού ουράς και ειδικότερα αν το άλογο έχει ευαίσθητο δέρμα ή πάσχει από αλλεργίες. Αν διαπιστώσετε ότι το δέρμα έχει ερεθιστεί, αφαιρέστε το προστατευτικό ουράς και περιμένετε μέχρι να επουλωθεί η ερεθισμένη περιοχή. Για να αποφύγετε τυχόν ερεθισμό του δέρματος, βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό ουράς είναι

καθαρό και στεγνό. Επίσης, φροντίστε να μην σφίγγετε υπερβολικά το προστατευτικό ουράς στην ουρά. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην διεύθυνση garmin.com/blazecare.

Για να αποτρέψετε πιθανό ερεθισμό του δέρματος, το προστατευτικό ουράς θα πρέπει να φοριέται μόνο για έως και 10 ώρες σε διάστημα 24 ωρών.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε ανθρώπους. Μην επιχειρήσετε να την χρησιμοποιήσετε σε άνθρωπο.


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ελαχιστοποιήστε την έκθεση σε αντηλιακά, χλωρίνη, αντικουνουπικά και χημικές ουσίες που περιέχουν ορισμένα σαπούνια και κρέμες πρώτων βοηθειών. Ειδικότερα, η προπυλενογλυκόλη, η διπροπυλενογλυκόλη και το αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA) μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο προστατευτικό ουράς.

Πριν τοποθετήσετε το προστατευτικό ουράς στο άλογό σας, βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας είναι σταθερά τοποθετημένος στο προστατευτικό ουράς με τα βέλη ευθυγραμμισμένα (σελίδα 3).

- 1 Σύρετε το ανοιχτό προστατευτικό κάτω από την ουρά του αλόγου μέχρι


να ευθυγραμμιστεί με το κέντρο της ουράς.

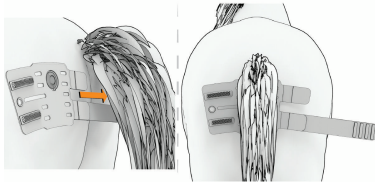


- 2** Ασφαλίστε το προστατευτικό της ουράς χρησιμοποιώντας τους δύο κύριους ιμάντες με άγκιστρο και βρόχο.



- 3** Τυλίξτε τον ιμάντα προέκτασης γύρω από το προστατευτικό ουράς όσες φορές χρειάζεται για να εξασφαλίσετε καλή εφαρμογή και στερεώστε το χρησιμοποιώντας το κούμπωμα με άγκιστρο και βρόχο.

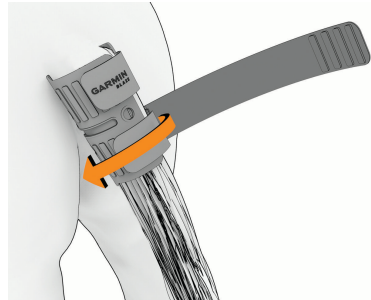

- 4** Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό εφαρμόζει καλά στην ουρά του αλόγου.

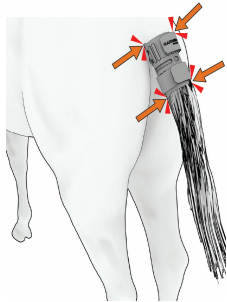

Θέματα σχετικά με την τοποθέτηση του προστατευτικού ουράς

Όταν τοποθετείτε το Blaze™ Equine Wellness System στην ουρά του αλόγου σας, λάβετε υπόψη αυτές τις παραμέτρους πριν ξεκινήσετε ιππασία.

- Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας είναι κεντραρισμένος στην κάτω πλευρά της ουράς του αλόγου.
- Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό ουράς είναι στερεωμένο με ασφάλεια και σφιχτά.
- Τυλίξτε τον μάντα προέκτασης γύρω από ολόκληρο το προστατευτικό ουράς αφού στερεώσετε το προστατευτικό ουράς.

- Βεβαιωθείτε ότι το λογότυπο Garmin® εμφανίζεται με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω, στο μπροστινό ή στο πίσω μέρος της ουράς, όταν τοποθετείτε το προστατευτικό ουράς στο άλογο.
- Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό ουράς είναι καθαρό.
- Σκουπίζετε τα επιθέματα γέλης στο προστατευτικό ουράς πριν από κάθε χρήση.

Οδηγίες για το Blaze™ Equine Wellness System

Ο αισθητήρας Blaze™ και η εφαρμογή Blaze

Η εφαρμογή Blaze συνδέεται στον αισθητήρα σας Blaze μέσω της τεχνολογίας Bluetooth® και παρέχει πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες.

- Διαχειριστείτε τα άλογα και τους αισθητήρες σας.
- Καταγράψτε μια δραστηριότητα.
- Προβάλετε πληροφορίες δραστηριότητας.
- Παρατηρήστε μια δημόσια δραστηριότητα.
- Διαχειριστείτε ρυθμίσεις.

Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής Blaze από το κατάστημα εφαρμογών στο τηλέφωνό σας.

Αντιστοιχίση του αισθητήρα Blaze™ με το τηλέφωνό σας

Για να χρησιμοποιήσετε τις συνδεδεμένες δυνατότητες του Blaze Equine Wellness System, πρέπει να αντιστοιχίσετε τον αισθητήρα απευθείας μέσω της εφαρμογής Blaze, αντί από τις ρυθμίσεις Bluetooth® στο τηλέφωνό σας.

- 1 Τοποθετήστε το συμβατό τηλέφωνό σας σε απόσταση έως 10 m (33 ft.) από τον αισθητήρα σας.
- 2 Από το κατάστημα εφαρμογών στο τηλέφωνό σας, εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή Blaze.
- 3 Για να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα, πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί συσκευής στον αισθητήρα.
- 4 Περιμένετε μέχρι η λυχνία LED στον αισθητήρα να αναβοσβήσει με μπλε χρώμα.
- 5 Από την εφαρμογή, επιλέξτε το ⊕ > **Add Sensor** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην

οθόνη για να αντιστοιχίσετε τον αισθητήρα σας.

Δημιουργία προφίλ για το άλογό σας

Μπορείτε να ενημερώσετε το όνομα, την ηλικία, το ύψος, το βάρος, το φύλο, τον τύπο, τους στόχους καρδιακών παλμών αποκατάστασης και το αναγνωριστικό μικροτσιπ του αλόγου σας.

- 1 Από την εφαρμογή Blaze™ στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε ⊕ > **Add Horse**.
- 2 Εισαγάγετε το όνομα και την ηλικία του αλόγου.
- 3 Επιλέξτε **Save**.
- 4 Εισαγάγετε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το άλογό σας.
- 5 Επιλέξτε **Save**.

Ενημέρωση προφίλ αλόγου

- 1 Από την εφαρμογή Blaze™ στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε ●● > **Manage Horses**.
- 2 Επιλέξτε ένα άλογο.
- 3 Επεξεργαστείτε το προφίλ.
- 4 Επιλέξτε **Save**.

Διαγραφή προφίλ αλόγου

- 1 Από την εφαρμογή Blaze™ στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε ••• > **Manage Horses**.
- 2 Επιλέξτε ένα άλογο.
- 3 Επιλέξτε το ⋮ > **Delete Horse** > **Delete All**.

Έναρξη δραστηριότητας στην εφαρμογή Blaze™

- 1 Από την εφαρμογή Blaze στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Start Activity**.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο δραστηριότητας.
- 3 Επιλέξτε ένα άλογο.
- 4 Επιλέξτε έναν αισθητήρα.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να χρησιμοποιήσετε το GPS στο τηλέφωνό σας για να λάβετε ακριβή δεδομένα χάρτη απόστασης, ταχύτητας και δραστηριότητας, επιλέξτε **Use this phone's location**.
 - Για να κάνετε τη δραστηριότητα ορατή σε κοντινούς χρήστες της εφαρμογής Blaze, επιλέξτε **Broadcast this activity**.

- 6 Επιλέξτε **Continue** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Διακοπή δραστηριότητας στην εφαρμογή Blaze™

Από την εφαρμογή Blaze στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Stop** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Παρατήρηση δραστηριότητας στην εφαρμογή Blaze™

Μπορείτε να παρατηρείτε τη δραστηριότητα ενός άλλου αλόγου από την εφαρμογή Blaze. Το άλογο πρέπει να φοράει έναν αισθητήρα που μεταδίδει τη δεδομένη στιγμή μια δραστηριότητα και να βρίσκεται εντός της εμβέλειας του τηλεφώνου σας.

- 1 Από την εφαρμογή Blaze στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Live**.
- 2 Επιλέξτε ένα άλογο για παρατήρηση.

Ονομασία αισθητήρα

Μπορείτε να παράσχετε ένα μοναδικό όνομα για τον αισθητήρα σας, ώστε να μπορείτε να τον αναγνωρίζετε εύκολα.

- 1 Από την εφαρμογή Blaze™ στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε ••• > **Manage Sensors**.

- 2 Δίπλα στον αισθητήρα που θέλετε να ονομάσετε, επιλέξτε το **> Name Sensor**.
- 3 Εισαγάγετε ένα όνομα για τον αισθητήρα.
- 4 Επιλέξτε **Done**.

Ο αισθητήρας Blaze™ και το ρολόι Garmin®

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Blaze από την εφαρμογή Connect IQ™ στο συμβατό σας ρολόι Garmin για να ξεκινήσετε μια δραστηριότητα και να προβάλετε ζωντανά βιομετρικά δεδομένα για το άλογό σας (<https://garmin.com/blazecompatibility>). Μπορείτε να προσθέσετε εφαρμογές Connect IQ στο ρολόι σας χρησιμοποιώντας το κατάστημα Connect IQ στο ρολόι ή το τηλέφωνό σας (garmin.com/connectiqapp).

Λήψη λειτουργιών του Connect IQ™

Για να μπορέσετε να κάνετε λήψη λειτουργιών από την εφαρμογή Connect IQ, πρέπει να αντιστοιχίσετε το ρολόι σας Garmin® με το τηλέφωνό σας (σελίδα 7). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του ρολογιού σας για περισσότερες πληροφορίες.

- 1 Από το κατάστημα εφαρμογών του τηλεφώνου σας, εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή Connect IQ.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το ρολόι σας.
- 3 Επιλέξτε μια λειτουργία του Connect IQ.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αντιστοιχισμός του αισθητήρα Blaze™ με το ρολόι σας

Για να μπορέσετε να αντιστοιχίσετε τον αισθητήρα με το ρολόι σας, πρέπει να αντιστοιχίσετε τον αισθητήρα με την εφαρμογή Blaze στο τηλέφωνό σας (σελίδα 7), να προσθέσετε ένα άλογο στην εφαρμογή Blaze στο τηλέφωνό σας (σελίδα 7) και να κάνετε λήψη της εφαρμογής Blaze στο ρολόι σας από το κατάστημα Connect IQ™ στο ρολόι ή το τηλέφωνό σας (σελίδα 9).

- 1 Για να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα, πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί συσκευής στον αισθητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε απόσταση 10 m (33 ft) από άλλους ασύρματους

- αισθητήρες κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντιστοίχισης.
- 2 Περιμένετε μέχρι η λυχνία LED να ξεκινήσει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
 - 3 Ανοίξτε την εφαρμογή Blaze στο ρολόι σας.
Η εφαρμογή πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση για τον αισθητήρα σας.
 - 4 Επιλέξτε τον αισθητήρα που θέλετε.
 - 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 - 6 Επιλέξτε το ✓ για να μεταδώσετε τη δραστηριότητα, κάτι που κάνει τη δραστηριότητα ορατή σε κοντινούς χρήστες της εφαρμογής Blaze™.
 - 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Η συσκευή καταγράφει δεδομένα δραστηριότητας μόνο όταν εκτελείται η αντίστροφη μέτρηση της δραστηριότητας.

Έναρξη δραστηριότητας στο ρολόι σας

- 1 Ανοίξτε τη λίστα δραστηριοτήτων στο συμβατό σας ρολόι Garmin®.
- 2 Επιλέξτε **Blaze > Start Activity**.
- 3 Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που ξεκινάτε μια δραστηριότητα ή έχετε αντιστοιχίσει πολλούς αισθητήρες, επιλέξτε τον αισθητήρα σας.
- 4 Εάν είναι απαραίτητο, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αντιστοιχίσετε τον αισθητήρα σας.
- 5 Επιλέξτε έναν τύπο δραστηριότητας.

Στοιχεία συσκευής

Προδιαγραφές

Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη, ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Έως και 25 ώρες
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -10° έως 60°C (από 14° έως 140°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 3° έως 47°C (από 37° έως 117°F)
Ασύρματη συχνότητα	2,4 GHz με μέγιστη τιμή τα 19,8 dBm
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7 ¹

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρήστε τα εξαρτήματα καθαρά, χωρίς υπολείμματα.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, διαλυμάτων και εντομοαπωθητικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και στα φινιρίσματα.

Μην βυθίζετε και μην πλένετε με πίεση τα εξαρτήματα.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Αντικαθιστάτε εξαρτήματα μόνο με εξαρτήματα Garmin®. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Garmin ή στον ιστότοπο της Garmin.

Καθαρισμός της συσκευής

- 1 Αφαιρέστε τον αισθητήρα στο προστατευτικό ουράς.
- 2 Καθαρίστε την επιφάνεια του αισθητήρα με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα ή καθαρό νερό.
- 3 Χρησιμοποιήστε μια μαλακή οδοντόβουρτσα και ισοπροπυλική αλκοόλη για να καθαρίσετε τα

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην εξής διεύθυνση: www.garmin.com/waterrating.

υπολείμματα από τα σημεία επαφής φόρτισης στον αισθητήρα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε τη συσκευή και ποτέ μην πιάνετε και μην ακουμπάτε τυχόν ανοίγματα στη μονάδα.

- 4 Σκουπίστε τον αισθητήρα μέχρι να στεγνώσει.
- 5 Πλύνετε το προστατευτικό ουράς με ήπιο απορρυπαντικό στο χέρι.
- 6 Κρεμάστε το προστατευτικό ουράς για να στεγνώσει.

Συμβουλές για τον καθαρισμό και τη φύλαξη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ελαχιστοποιήστε την έκθεση σε αντιηλιακά, χλωρίνη, αντικουνουπικά και χημικές ουσίες που περιέχουν ορισμένα σαπούνια και κρέμες πρώτων βοηθειών. Ειδικότερα, η προπυλενογλυκόλη, η διπροπυλενογλυκόλη και το αιθυλοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA) μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο προστατευτικό ουράς.

- Κατά τη φύλαξη του προστατευτικού ουράς, κρεμάστε το

ή ακουμπήστε το πάνω σε επίπεδη επιφάνεια.

- Αποφύγετε να λυγίζετε ή να τυλίγετε σφιχτά το προστατευτικό ουράς.
- Μην φυλάσσετε τον αισθητήρα ή το προστατευτικό ουράς σε σημεία που έρχονται σε άμεση επαφή με το φως του ήλιου ή σε χώρους όπου αναπτύσσονται ακραίες θερμοκρασίες.
- Μην καθαρίζετε τον αισθητήρα ή το προστατευτικό ουράς με χλωρίνη και μην τα βυθίζετε σε καθαριστικά.
- Μην χρησιμοποιείτε απολυμαντικά μαντηλάκια ή ισοπροπυλική αλκοόλη στα επιθέματα γέλης.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαντηλάκι με ισοπροπυλική αλκοόλη 70% για να σκουπίσετε απαλά το εξωτερικό του αισθητήρα και το προστατευτικό ουράς.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα απολυμαντικό μαντηλάκι για να σκουπίσετε απαλά το εξωτερικό του αισθητήρα και του προστατευτικού ουράς, αλλά η Garmin® συνιστά να ξεπλένετε τον αισθητήρα και το προστατευτικό ουράς κάτω από νερό για να αφαιρέσετε τυχόν χημικά

υπολείμματα που έχουν απομείνει από το μαντηλάκι και να αποφύγετε πιθανό ερεθισμό του δέρματος.

Ενημερώσεις προϊόντος

Η συσκευή σας ελέγχει αυτόματα για ενημερώσεις όταν αντιστοιχίζεται με ένα τηλέφωνο που χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth®. Μπορείτε να ελέγξετε μη αυτόματα για ενημερώσεις από τις ρυθμίσεις συστήματος. Στο τηλέφωνό σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Blaze™.

Αυτή η εφαρμογή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin®:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Τα δεδομένα αποστέλλονται στην εφαρμογή Blaze του τηλεφώνου σας
- Δήλωση προϊόντος

Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής με την εφαρμογή Blaze™

- 1 Από την εφαρμογή Blaze στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε το **••• > Manage Sensors**.
- 2 Στον αισθητήρα που θέλετε να ενημερώσετε, επιλέξτε **Software Update Available**.

- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Λήψη περισσότερων πληροφοριών

- Επισκεφτείτε τη διεύθυνση **support.garmin.com** για περισσότερα εγχειρίδια, άρθρα και ενημερώσεις λογισμικού.
- Για πληροφορίες σχετικά με προαιρετικά αξεσουάρ και ανταλλακτικά εξαρτήματα, μεταβείτε στη διεύθυνση **buy.garmin.com** ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Garmin®.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συμβουλές για ακανόνιστα δεδομένα καρδιακών παλμών

Αν τα δεδομένα καρδιακών παλμών είναι ακανόνιστα ή δεν εμφανίζονται, μπορείτε να δοκιμάσετε αυτές τις συμβουλές.

- Καθαρίστε και στεγνώστε την ουρά του αλόγου και τη γύρω περιοχή πριν τοποθετήσετε το προστατευτικό ουράς.

- Αποφύγετε την εφαρμογή αντηλιακού, λοσιόν και εντομοαπωθητικού κάτω από τον αισθητήρα.
- Μην προκαλείτε γρατζουνιές στον αισθητήρα καρδιακών παλμών που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό ουράς είναι σφιχτό αλλά άνετο.
- Ξεπλένετε τον αισθητήρα με γλυκό νερό μετά από κάθε δραστηριότητα.

Είναι το ρολόι μου Garmin® συμβατό με τον αισθητήρα Blaze™;

Ο αισθητήρας Blaze είναι συμβατός με ορισμένα ρολόγια Garmin.

Για πληροφορίες συμβατότητας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://garmin.com/blazecompatibility>.

Το τηλέφωνό μου δεν συνδέεται στη συσκευή

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση έως 10 m (33 ft.) από το τηλέφωνό σας.
- Εάν οι συσκευές σας είναι ήδη αντιστοιχισμένες, απενεργοποιήστε

την τεχνολογία Bluetooth® στο τηλέφωνό σας και ενεργοποιήστε την ξανά.

- Εάν οι συσκευές σας είναι ήδη αντιστοιχισμένες, καταργήστε τον αισθητήρα Blaze™ από τις ρυθμίσεις Bluetooth στο τηλέφωνό σας και επαναλάβετε την αντιστοίχιση των συσκευών.
- Αν δεν έχετε αντιστοιχίσει τις συσκευές σας, ενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth στο τηλέφωνό σας.
- Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Blaze και επιλέξτε ⊕ > **Add Sensor** για να μεταβείτε στη λειτουργία αντιστοίχισης.

Ο αισθητήρας Blaze™ δεν ανταποκρίνεται

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση του αισθητήρα Blaze στην εφαρμογή Blaze, μπορείτε να δοκιμάσετε αυτές τις επιλογές.

- Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας είναι φορτισμένος και ενεργοποιημένος (σελίδα 15).
- Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου

εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας (σελίδα 11).

- Απενεργοποιήστε τον αισθητήρα και ενεργοποιήστε τον ξανά (σελίδα 1).

Δεν μπορώ να επιλέξω τον αισθητήρα μου για μια δραστηριότητα

Εάν ο αισθητήρας σας είναι ορατός αλλά δεν μπορείτε να τον επιλέξετε, ίσως χρειαστεί να επανασυνδέσετε τον αισθητήρα.

- Από την εφαρμογή Blaze™ στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε το **••• > Manage Sensors** και κατόπιν επιλέξτε **Reconnect** στον αισθητήρα.

Επανεκκίνηση του αισθητήρα

- 1 Για να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί συσκευής μέχρι η λυχνία LED να αναβοσβήνει σταθερά με λευκό χρώμα.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα, πατήστε το κουμπί συσκευής.

Επαναφορά του αισθητήρα

Πριν επαναφέρετε τον αισθητήρα, θα πρέπει να προσπαθήσετε να τον επανεκκινήσετε για να αποφύγετε τη διαγραφή δεδομένων και ρυθμίσεων (σελίδα 15).

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του αισθητήρα στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές και να καταργήσετε όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα χρήστη.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα, πατήστε το κουμπί συσκευής (αν χρειάζεται).
- 2 Πατήστε το κουμπί συσκευής τρεις συνεχόμενες φορές. Η λυχνία LED κατάστασης ανάβει με κόκκινο χρώμα.
- 3 Ενώ η λυχνία LED κατάστασης είναι κόκκινη, κρατήστε πατημένο το κουμπί συσκευής μέχρι η λυχνία LED κατάστασης να ανάψει με λευκό χρώμα.

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
Πώς μπορώ να ελέγξω τη στάθμη της μπαταρίας;

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
Από την εφαρμογή Blaze™ στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **••• > Manage Sensors**.

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
Η στάθμη της μπαταρίας
εμφανίζεται κάτω από το όνομα του
αισθητήρα.

Κατάργηση αισθητήρα

- 1 Από την εφαρμογή Blaze™ στο
τηλέφωνό σας, επιλέξτε ●●● >
Manage Sensors.
- 2 Στον αισθητήρα που θέλετε να
καταργήσετε, επιλέξτε το ⋮ >
Remove Sensor.







support.garmin.com

© 2025 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Garmin® and the Garmin logo are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Connect IQ™, Garmin Connect™, and Blaze™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

M/N: A04392, AA4392



GUID-37427B17-5A2B-4078-81A2-574F8E90F3ED v2
Δεκέμβριος 2025